

Indice 25	Date 05/09/22	Nature des modifications : Changement des modalités de prélèvement (suppression iodo acétate)
--------------	------------------	--

Rédacteur : L. WIJNANTS	Approbateur : V. DECOOL
-----------------------------------	-----------------------------------

ETIQUETTES CODE-BARRES

CB	Tube	Analyses	Automate
03	Liquides	Liquides de ponction	ALINITY
04	Ecouvillon	PCR COVID et Variants	INGENIUS
08	EDTA	Hémoglobine A1c	D100/D10
09	Citrate (plein)	Plaquettes sur citrate	YUMIZEN
10	EDTA	NFS, réticulocytes VS	YUMIZEN AUTOCOMPACT
11	Héparine	Acide urique , Albumine sérique, Amylase , Apolipoprotéine A1 / B, Bicarbonates (CO ₂), Bilirubine (directe et totale), Calcium , Cholestérol, Cholestérol HDL , Cholestérol LDL, CPK totales, Créatinine, CRP, Facteur Rhumatoïde , Fer Ferritine, Gamma GT, HCG , Hépatite A (IgM), Hépatite B (AchBc, AchBs, AgHBs), Hépatite C, HIV, Ionogramme (NA, K, Cl), LDH, Lipase, Magnésium, NT proBNP, Phosphatases alcalines, Phosphore , Procalcitonine, Protides, PSA libre, PSA totale , rubéole, Syphilis BW, T3L, T4L, Toxo, Transaminases, Transferrine, Triglycérides, Troponine, TSH, Urée	ALINITY
12	Fluorure	GPD, Hyperglycémies (GSULL, HPO75 1 ^e heure)	ALINITY
13	Fluorure	GDE, Hyperglycémies (HPO75 2 ^e heure)	ALINITY
14	Fluorure	Glycémie de journée (GJ)	ALINITY
16	Sec gel	Ac anti récepteur TSH, BW Syphilis, COVID, CA 125, CA 15.3 , CA 19.9 , ACE , AFP, Cortisol, COVID sérologie, FSH , LH , Lithium, Oestradiol , Progestérone , Prolactine , Testostérone, Immunoglobulines (A G M) , Digoxine, Folates , Vitamine B12 , Vitamine D	ALINITY
17	Fluorure	Acide Lactique, Glycémie	ALINITY
18 à 19	Sec gel	Test au Primperan [®] (<i>prolactine</i>)	ALINITY
20	Urines	Bence Jones	V8
22	Urines	Albumine, Micro albumine, Sucre, Iono, Urée, Créatinine...	ALINITY
25	Urine acidifiée	Urine + acide pour dosage du calcium, phosphore, magnésium	ALINITY
26	Urine alcalinisée	Urine + soude pour dosage de l'acide urique	ALINITY
27	Urines	Cortisol urinaire	ALINITY
30	EDTA	Groupe rhésus, phénotype, RAI , Coombs	QWALYS
31	Ecouvillon	Variants COVID	RT PCR
32	Ecouvillon	PCR COVID	RT PCR
33	Citrate (plein)	Coagulation, DDimères, activité anti Xa, facteurs + <i>étiquette COAG autour du bouchon</i> pour les facteurs	STAGO
42	Sec gel	Sérologies : EBV, Lyme, CMV	VIDAS
44	Sec gel	Préalbumine	ALINITY
48	EDTA	BNP	ALINITY
50 à 70	Variable	Envoi labo extérieur	-
77	EDTA	PTH (parathormone)	LIAISON
78	Sec gel	Electrophorèses, immuno électrophorèses	V8

Indice 25	Date 05/09/22	Nature des modifications : Changement des modalités de prélèvement (suppression iodo acétate)
--------------	------------------	--

CB	Tube	Analyses	Automate
79	Sec gel	Chlamydia sérologie	LIAISON
81 à 85	Fluorure	Glycémies d'hyperglycémie provoquées (30, 60, 90, 120, 180')	ALINITY
89	Sec gel	Cortisol pour le test au synacthène low dose	ALINITY
90	Sec gel	Cortisol H (en cours de journée, J +1, test de nugent, TSYN)	ALINITY
91	Sec gel	Allergie (Phadiatop, Trophatop, RAST, Ig E)	UNICAP
92	Sec gel	ACNUC, ACSOL, Cortisol 12h	PHD/UNICAP/ ALINITY
93	Sec gel	Cortisol 16H, test au synacthène	ALINITY
94	Sec gel	ACTRA	PHDIX
95	Sec gel	ACCCP, ACDNA, ACTG, ACTPO, Waler	PHDIX
96	Sec gel	Test au synacthène	ALINITY
BL	Urines	Acétone, ph, densité urinaire, nitrites	UC1000
-	VITEK	Prélèvements de bactériologie	VITEK
-	SCANBAC	Prélèvements de bactériologie	SCANBAC
-	UF4000	Cytologie urinaire	SYSMEX UF4000

ETIQUETTES SPECIFIQUES

Certaines étiquettes n'ont pas de code-barres mais comportent une inscription particulière, fonction des analyses demandées (par exemple PV, ECBU, A24...).

REMARQUES :

- Lorsque cela n'est pas précisé, le laboratoire destinataire de l'analyse est le laboratoire des Francs ;
- Les flacons d'urines utilisés pour plusieurs dossiers doivent être identifiés avec toutes les étiquettes correspondantes.

MENTIONS SPECIFIQUES



Pour les examens urgents ou nécessitant un traitement : un signalement par une pastille rouge ● sur l'étiquette et/ou l'ajout d'un anneau de couleur orange sur le bouchon sont effectués.

En bactériologie, tout dossier « urgent » (notion eue à l'enregistrement du dossier, en fonction du contexte clinique ou des résultats obtenus) est suivi via une bannette rouge.



Tout examen peut être considéré comme urgent en fonction du contexte clinique. Dans ce cas, la notion d'urgence est indiquée à l'enregistrement du dossier et elle est suivie dans le SIL grâce au tableau de bord visualisable par les techniciens et les biologistes.